

Dokument Nr.:	35-06-CL05	Checkliste Vorbehandlung und Versand von kontaminierten Poolinstrumenten	sermaX®
Version:	1.0		
Gültig ab:	12.09.2017		
Seite:	1 von 1		

1. Nach Anwendung der MP am Patienten

- MP vorreinigen
- MP maschinell oder manuell desinfizieren
- Manuell desinfizieren: MP in Desinfektionslösung einlegen, z.Bsp. Septo PreClean (bei sermaX AG erhältlich)
- MP mit Wasser gut abspülen
- MP trocknen



2. MP korrekt verpacken

- MP (mit Spitze nach unten) in weissen Behälter mit grünem Deckel legen
- MP ggf. mit Korrosionsschutzspray besprühen (bei sermaX AG erhältlich)
- Grüner Deckel gut verschliessen



3. Bereitstellen für Versand

- Weisser Behälter in blaue Transportbox geben
- Begleitschein ausfüllen und in blaue Transportbox beilegen
- Transportbox gut verschliessen und Deckel diagonal, mit je einer roten Plombe plombieren (zwingend)
- Versandetikette auf Deckel anbringen
- Transportbox für Abholung bereitstellen
- **Nicht korrekt verpacktes Material wird vom Kurierdienst nicht mitgenommen!**



4. Wichtig!

Die Poolinstrumente dürfen nicht mit eigenen Instrumenten gemischt werden! Pool Instrumente müssen im Behälter mit grünem Deckel retourniert werden. Poolbegleitschein immer beilegen.

